

## Tuberkulose-Suchtest: QuantiFERON®-TB Gold Plus


NEU



QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus) ist ein modernes Testverfahren zum indirekten Nachweis einer latenten oder aktiven Tuberkulose. Der Test ist dem Tuberkulintest (Mantoux) in der Spezifität überlegen. Positive Ergebnisse müssen mittels Kultur und PCR bestätigt werden.

**Noch weiter vereinfachte Präanalytik:** In der Praxis kann das Blut mit einem einzigen Lithium-Heparin-Röhrchen entnommen werden.

**NEU** Das Lithium-Heparin-Röhrchen kann bis zu **48 Stunden gekühlt (2–8°C)** aufbewahrt und transportiert werden.

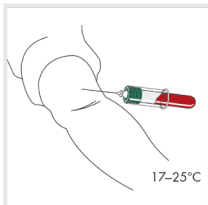


In der Praxis

17–25°C

Entnehmen Sie 1 Lithium-Heparin-Röhrchen mit **5 ml Blut**. Mischen Sie den Inhalt, indem Sie das Röhrchen mehrfach vorsichtig kippen.

**Beschriften** Sie das Röhrchen und geben Sie dabei auch die **Uhrzeit der Blutentnahme** an.

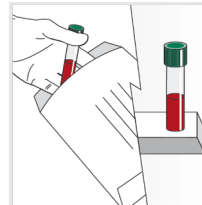

Einsendung ins Labor

Senden Sie das Röhrchen wie bisher mit dem Kurier am gleichen Tag bei Raumtemperatur ins Labor.

**NEU** Falls ein Transport mit dem Kurier am selben Tag nicht mehr möglich ist, können Sie das Heparin-Röhrchen über Nacht in den Kühlschrank stellen und dem Kurier am nächsten Morgen **direkt aus dem Kühlschrank** für den Transport ins Labor mitgeben.

Bei einer Blutentnahme am Samstag/Sonntag die Probe am Montag dem Kurier mitgeben.

Ihre Ansprechpartner



**PD Dr. med. Axel Regeniter**

Facharzt für Labormedizin  
FAMH pluridisziplinär  
Telefon: 044 269 9934



**PD Dr. med. Werner Siede**

Facharzt für Labormedizin  
Telefon: 044 269 99 95

...und Ihre Partnerlabors